



GEBRUIKSAANWIJZING UNICARE®

Unicare contactlensvloeistof alles-in-een voor zachte contactlenzen is een uitgekiende vloeistof die met behulp van filtratie gesteriliseerd is. Unicare vloeistof desinfecteert en is geschikt voor het schoonmaken, bewaren en inzetten van zachte contactlenzen. Unicare verzekert een optimale bescherming en desinfectie van uw zachte contactlenzen. Unicare kan vrijwel alle onderhoudssystemen voor zachte contactlenzen vervangen en is geschikt voor in principe alle soorten zachte contactlenzen.

REINIGEN

Was uw handen (bij voorkeur met een desinfecterende zeep) en zorg ervoor dat er geen zeepresten achterblijven. Droog uw handen af met een schone, niet pluizende doek. Verwijder uw rechter lens uit het oog en leg deze in uw handpalm. Giet nu 5-10 druppels Unicare op de lens en wrijf de lens aan beide kanten voorzichtig schoon met behulp van uw wijsvinger. Deze handeling voert u gedurende 30 seconden uit. Pak de lens tussen duim en wijsvinger en schud de overtollige vloeistof van de lens. Spoel de lens daarna af met Unicare.

Voor een optimale desinfectie dient u bovengenoemde handeling te herhalen. Plaats de lens vervolgens in de met verse Unicare gevulde lenshouder. Volg dezelfde procedure voor de linker lens.

DESINFECTEREN, BEWAREN EN INZETTEN

Uw lenzen bewaart u in een gesloten lenshouder. Voor een optimale desinfectie dienen de lenzen minimaal 4 uur in de lenshouder bewaard te blijven. De Unicare vloeistof in de lenshouder dient iedere dag ververs te worden. Wanneer de lenzen gedurende een langere periode niet gebruikt worden, dient u ze in de Unicare vloeistof te bewaren. Na desinfectie kunt u de lenzen direct inzetten.


BELANGRIJK:

Houd altijd dezelfde volgorde aan bij het inzetten en verwijderen van de lenzen, om verwisseling te voorkomen. In geval van oogirritatie, staak het gebruik en raadpleeg een arts of een contactlensspecialist. Na opening niet langer dan 90 dagen gebruiken. Bij kamertemperatuur (4°C-25°C) bewaren. Raak de opening van de flacon niet aan. Houd de lenshouder goed schoon. Buiten gebruik van kinderen houden.

Samenstelling: Poloxamer 407, NaCl

Conserveermiddel: PHMB 0,0001%

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur een e-mail naar info@melleleson.nl

 Melleleson Pharma
NL-4817 ZH 7384 Breda
06/2011

03REF0128

 0344



UNICARE[®]

MODE D'EMPLOI UNICARE[®]

Unicare, solution tout-en-un pour lentilles de contact souples, est un produit bien équilibré stérilisé par filtration. Grâce à son effet décontaminant, Unicare est un produit idéal pour le nettoyage, la conservation et la pose de lentilles de contact souples. Unicare assure une sécurité optimale ainsi que la décontamination de vos lentilles de contact souples. Unicare peut remplacer quasiment tout type de système d'entretien pour lentilles de contact souples et convient en principe à tout type de lentilles de contact souples.

NETTOYAGE

Se laver les mains (de préférence avec du savon décontaminant) et supprimer soigneusement tout résidu savonneux. Sécher les mains avec un tissu sec non pelucheux. Retirer la lentille de l'œil droit et la poser dans la paume de la main. Verser 5 à 10 gouttes de solution Unicare sur la lentille pour nettoyer avec soin chaque côté de la lentille avec l'index. Effectuer ce traitement pendant une trentaine de secondes. Prendre la lentille entre le pouce et l'index pour éliminer le liquide superflu de la lentille en la secouant. Rincer ensuite la lentille avec Unicare.

Pour obtenir une décontamination optimale, répéter la procédure susmentionnée. Placer ensuite la lentille dans l'étui rempli de solution Unicare fraîche. Répéter la même procédure pour celle de gauche.

DÉCONTAMINATION, CONSERVATION ET POSE

Conserver les lentilles dans l'étui à lentilles fermé. Pour obtenir une décontamination optimale, conserver les lentilles au moins pendant 4 heures dans l'étui à lentilles. Rafraîchir chaque jour la solution Unicare dans l'étui à lentilles. En cas de non-utilisation prolongée, conserver les lentilles dans du liquide Unicare. On peut poser les lentilles immédiatement après la décontamination.


Important:

Pour poser et retirer les lentilles, suivre systématiquement le même ordre afin de ne pas les confondre. En cas de gêne persistante, cesser l'utilisation du produit et consulter un médecin ou un spécialiste de lentilles de contact. Après l'ouverture du flacon, jeter la solution résiduelle au bout de 90 jours. Conserver à une température ambiante (4°C à 25°C). Éviter tout contact avec l'ouverture du flacon. Respecter soigneusement la propreté de l'étui à lentilles. A conserver en dehors de la portée des enfants.

Composition: Poloxamer 407, chlorure de sodium

Conservateur: PHMB 0,0001%

En cas de questions ou de remarques, envoyez un e-mail à info@melleson.nl

 Melleson Pharma
NL-4817 ZH 7384 Breda

 0344