

BioClin Multi-Mam Kompressen voor de behandeling van overbelaste tepels

- werkt direct verzachtend
- voorkomt infecties
- ondersteunt een snel herstel van tepelkloofjes
- verbetert de conditie van de tepels

Lees voor gebruik de bijsluiter van Multi-Mam Kompressen en bewaar de bijsluiter goed.

Behandeling van tepelproblemen bij borstvoeding

Tepelbeschadigingen, zoals alle wonden, helen het beste in een vochtige omgeving. Gebruik van een vochtige wondbedekking vermindert aanzienlijk de tepelpijn en reduceert significant de kloofjes en korstjes. Gebruik Multi-Mam Kompressen voor de behandeling van beschadigde tepels.

Een Multi-Mam Kompres bestaat uit verbandstof waarop een bio-actieve gel is aangebracht. De unieke manier van opbrengen van de bio-actieve gel met een geïmpregneerd kompres, helpt bij het onderhouden van een optimaal vochtig klimaat voor een snel herstel van het huidweefsel.

De werking van Multi-Mam Kompressen

Multi-Mam Kompressen zijn een compleet nieuwe aanpak van de behandeling van gevoelige, overbelaste of beschadigde tepels. Multi-Mam Kompressen verzachten direct bij zwelling en pijn, en gaan de groei van schadelijke bacteriën en het ontstaan van infecties tegen. De buitenzijde van het kompres is ademend geplastificeerd, waardoor de gel optimaal kan inwerken en uw BH niet kan bevleken. Deze bio-actieve, plantaardige gel kan zonder enig bezwaar door de baby worden doorgeslikt. U hoeft de tepels niet te reinigen voor de borstvoeding. De gel is volkomen veilig en laat een prettige, neutrale smaak achter.

Dosering en wijze van gebruik

Open het sachet bij de inkeping. Haal het kompres er uit en vouw het open. Leg het kompres over de tepel en druk het zachtjes aan, zodat de bio-actieve gel optimaal contact kan maken met het huidweefsel. Laat het kompres minimaal 5 minuten, liefst langer, op de tepel. Het kompres is eenvoudig onder uw BH op de tepel te dragen. Herhaal deze behandeling minimaal twee keer per dag, zolang het huidweefsel van de tepel nog niet volledig is hersteld. Multi-Mam Kompressen zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van gevoelige, overbelaste of beschadigde tepels van moeders die borstvoeding geven. Ze zijn echter ook geschikt bij tepelproblemen die niet veroorzaakt zijn door borstvoeding.

Bij aanhoudende klachten dient u altijd contact op te nemen met uw huisarts. Voor een goed advies kunt u ook terecht bij uw verloskundige, lactatiekundige, professionele kraamhulp of het consultatiebureau.

Samenstelling van Multi-Mam Kompressen

De gel op de Multi-Mam Kompressen is gebaseerd op het gepatenteerde zQR complex. Dit complex blokkeert schadelijke bacteriën op natuurlijke en veilige manier. Het zQR complex heeft de unieke eigenschap om de hechting van schadelijke bacteriën te blokkeren en op deze wijze dergelijke bacteriën te neutraliseren. Aanvullend op het belangrijke effect van het blokkeren van schadelijke bacteriën, ondersteunt de gel op de Multi-Mam Kompressen het natuurlijk herstelmechanisme van het weefsel en optimaliseert het de conditie van van de tepel. De gel van de Multi-Mam Kompressen is natuurlijk, bevat geen geurstoffen en geen ingrediënten van dierlijke afkomst. Het bevat geen conserveermiddelen, geen hormonen en is volledig onschadelijk.

Neveneffecten

De gel op het Multi-Mam Kompres kent geen schadelijk neveneffecten en kan zonder bezwaar door de baby worden doorgeslikt.


Zwangerschap en Lactatie

Multi-Mam Kompressen kunnen zonder bezwaar tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding gebruikt worden.


Multi-Mam kompressen zijn een medisch hulpmiddel, Klasse 1 volgens de EG richtlijn 93/42/EEC.




Wijze van gebruik

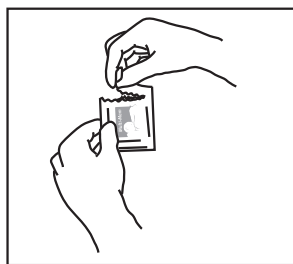

1. Open het sachet bij de inkeping en haal het kompres eruit

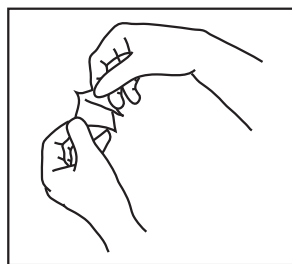

2. Vouw het kompres open

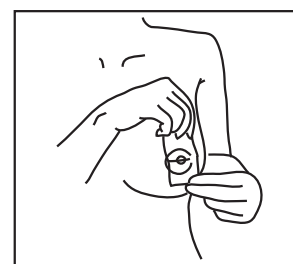

3. Leg het kompres over de tepel en druk het zachtjes aan

Bioclin heeft naast Multi-Mam ook Multi-Gyn producten

- Multi-Gyn Actigel voorkomt en behandelt vaginale klachten
- Multi-Gyn Vaginale Douche en Bruistabletten voor douchevloeistof ter voorkoming van vaginale klachten en een optimale hygiëne van de vagina
- Multi-Gyn Bevochtigingsgel voorkomt en behandelt vaginale droogheid
- Multi-Gyn FemiWash voor een optimale dagelijkse intiemhygiëne